



Manuale uso e manutenzione

Aggiornato al 28 maggio 2020



UNI EN14683
EN ISO 10993

DRÖPTM
MASCHERE DI PROTEZIONE MADE IN ITALY

MANUALE USO E MANUTENZIONE

Il presente documento riporta le istruzioni per l'uso della maschera di protezione naso-bocca lavabile e riutilizzabile della linea DROP indicata di seguito per brevità "Prodotto".

Questo manuale ha lo scopo di informare l'utilizzatore del Prodotto per assicurare le migliori condizioni di utilizzo e di manutenzione del Prodotto dopo l'acquisto. Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà di Cappello Group S.p.A. ne è vietata pertanto la riproduzione anche parziale.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL PRODOTTO

DROP Mask è un prodotto brevettato per invenzione industriale, modello di utilità e per design. Drop Mask è un Dispositivo Medico in classe I conforme alle indicazioni contenute nella Uni en 14683:2019 Direttiva 93/42/CEE Parte I, Allegato IX, Definizioni concernenti i Dispositivi Medici e modificata da MDD 2007/47/CE, (regolamento UE 2017/745). La semimaschera Drop Mask è classificabile secondo i parametri: **Durata**: Breve-lungo termine (secondo la Definizione 1.1). **Caratteristiche**: non invasive per modo di applicazione (secondo la Definizione 1.2). Inoltre la maschera ad uso medico Drop Mask essendo un dispositivo a contatto facciale per una durata limitata, è conforme alle norme di Biocompatibilità secondo la EN ISO 10993-1 2009.

È un Dispositivo Medico destinato alla prevenzione ovvero, destinato a svolgere una funzione ausiliaria, finalizzata alla prevenzione.

DROP Mask è progettata per proteggere le vie respiratorie naso-bocca per il tramite di un filtro apposto nella parte anteriore, all'interno di apposito alloggiamento, sul frontale della maschera in gomma anallergica. Tali filtri idrorepellenti, certificati alla fonte dal produttore per Grammatrice (ISO536), Spessore (ISO3034) Efficienza di filtrazione batterica (B.F.E) (ISO14683:2019), Permeabilità all'aria (ISO9237), e Traspirabilità (EN14683:2019 - EN 149) e Resistenza agli schizzi (EN14683:2019) sono realizzati in Poliestere sintetico a tre strati (SMS), Spunbond (PET) + Meltblown (PBT) + Spunbond (PET) termosaldati in un unico elemento senza termoleganti quali lattice e colle.

Il prodotto si compone di un corpo maschera in elastomero termoplastico morbido anallergica, un copri-filtro in Policarbonato rigido, due cinturini per il regolaggio al volto della maschera, in elastomero termoplastico morbido. La sua efficacia può rivelarsi funzionale contro particelle di polveri, saliva, muco e particelle oleose. Il Prodotto si compone, inoltre, di una visiera trasparente (Drop Shield) in policarbonato pressopiegato con protezione UV su entrambe le superfici, in grado di coprire il volto ed in modo particolare gli occhi, sino alla fronte. La visiera si installa fissandola al corpo centrale della maschera, nello specifico attorno alla ghiera centrale in gomma, bloccata dal tappo in PC. Ciò garantisce a DROP Mask di caratterizzarsi come prodotto in grado di proteggere l'individuo da particelle aeree e da spruzzi accidentali di

saliva e/o particelle di varia natura.

GARANZIA

Il Prodotto ha una garanzia di due anni. Le specifiche sulla sua attuazione sono visionabili sul contratto di Condizioni Generali di Acquisto, visionabile sul sito www.dropmask.it nella sezione MyDrop. Rimane comunque obbligatorio utilizzare il Prodotto in conformità alle caratteristiche d'impiego ed ai termini di utilizzo. Cappello Group S.p.A. garantisce che DROP Mask e Drop Shield sono realizzate con materiali conformi e non arrecano danni se correttamente utilizzate. Cappello Group S.p.A. non è responsabile per i danni generati da eventuali usi impropri.

In ragione di quanto sopra descritto, la garanzia decade qualora, ad un esame oggettivo del Prodotto, condotto presso gli stabilimenti di Cappello Group S.p.A. venissero riscontrati interventi, riparazioni e/o modifiche non previste dal fabbricante. La garanzia decade, altresì, qualora si riscontrasse negligenza nella manutenzione, da parte del fruitore del Prodotto, nel suo utilizzo.

Cappello Group S.p.A. applicherà la garanzia prevista secondo le modalità di seguito indicate:

1. Difetti di conformità di DROP Mask nei componenti che costituiscono il Prodotto. Validità 24 mesi dalla data di consegna al Cliente. Nota: Resta inteso che il difetto riscontrato dovrà essere comunicato entro un termine massimo di mesi 1 da quando è stato riscontrato il difetto stesso. Qualora la difformità fosse riscontrata al momento della consegna, il Prodotto non dovrà essere utilizzato e la comunicazione per la restituzione dovrà essere conforme a quanto riportato nel contratto delle Condizioni Generali di Vendita, presente nel sito www.dropmask.it alla sezione MyDrop.
2. La garanzia non copre i difetti generati da uso improprio, deterioramento, utilizzo di prodotti impropri per la pulizia e la manutenzione, contaminazione, integrazione di parti diverse e ulteriori da quelle presenti nel kit di acquisto.
3. Qualora si verificassero condizioni tali da non riconoscere la garanzia da parte del Produttore, le spese di spedizione saranno a carico del Cliente.
4. Cappello Group S.p.A. mantiene la facoltà di decidere se sostituire i componenti danneggiati che presentino difetti di conformità o di sostituire l'intero Prodotto, qualora questi, ad un accurato controllo mostrino un effettivo difetto di costruzione. Resta inteso, come previsto dall'art 130 del Codice del Consumo, che sono fatti salvi i diritti del Consumatore.

5. La garanzia è riconosciuta esclusivamente fornendo, al momento della segnalazione, il "Serial Number" univoco del prodotto, riportato all'esterno della confezione. Cappello Group S.p.A. non accetterà contestazioni e segnalazioni senza l'indicazione del numero seriale che è, inoltre, dimostrazione di originalità del prodotto.

MANUALE USO E MANUTENZIONE

6. L'acquirente si impegna a non sollecitare e/o utilizzare ulteriormente il Prodotto una volta riscontrato il problema. Tale condizione potrebbe pregiudicare la funzionalità per la quale il Prodotto è stato concepito.

7. Eventuali componenti non conformi e per questo sostituiti da Cappello Group S.p.A. rimarranno di proprietà del Produttore e non saranno restituiti all'Acquirente.

8. Cappello Group S.p.A. non assume responsabilità e non riconosce assistenza in garanzia nel caso in cui il prodotto non risulti tracciabile commercialmente (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di commercializzazione impropria, in Italia e all'Estero da parte di terzi non autorizzati dallo stesso produttore).

9. Cappello Group S.p.A. non avrà responsabilità sui tempi e sui modi dell'assistenza verso i Paesi esteri nei quali dovessero sorgere difficoltà nel garantire assistenza post-vendita e/o garanzia, qualora fossero in vigore possibili limitazioni nel Paese in cui il Prodotto è stato venduto.

COME UTILIZZARE LA GARANZIA

Per fruire della garanzia è sufficiente contattare il produttore all'indirizzo assistenza@dropmask.it inserendo come oggetto: "Richiesta garanzia per il dispositivo Drop Mask". In alternativa potrà contattare il Produttore compilando l'apposito form online sul sito www.dropmask.it > MyDrop. L'acquirente dovrà disporre, al momento della richiesta, del documento di acquisto (fattura di vendita o scontrino fiscale) e del Serial Number del prodotto, presente sulla confezione e comprovante l'originalità del prodotto. Nella mail o nel corpo del messaggio dovrà essere riportata una breve descrizione del problema riscontrato.

ELEMENTI NON COPERTI DA GARANZIA

Non sono coperti dalla garanzia le parti soggette ad usura e nello specifico:

1. Le parti danneggiate e/o usurate a seguito di un uso scorretto del Prodotto e dei suoi componenti;
2. Le parti danneggiate a seguito di una manutenzione e/o pulizia effettuata con prodotti aggressivi (acidi, candeggina) a titolo esemplificativo e non esaustivo;
3. I filtri di protezione intercambiabili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Drop Mask è un dispositivo per la protezione di naso e bocca realizzato con il corpo maschera in elastomero termoplastico anallergico. Questo composto è prodotto con materie prime anallergiche ed in grado di stare a contatto con la cute e gli alimenti. Inoltre è completamente riciclabile. All'interno alloggia filtri stratificati in Poliestere sintetico a tre strati (SMS), Spunbond (PET) +

Meltblown (PBT) + Spunbond (PET) termosaldati in un unico elemento senza termoleganti quali lattice e colle.

Grazie a questa composizione, DROP Mask può risultare efficace nella protezione di naso e bocca da particelle volatili nell'aria comprese gocce, polvere, spruzzi di saliva e muco.

Il Prodotto ha caratteristiche specifiche e non deve essere utilizzato impiegando altri componenti, ivi compresi filtri con caratteristiche diverse che possono risultare inadeguati e mettere in pericolo la propria incolumità e quella di altre persone.

DATI TECNICI

Dimensioni del corpo maschera: mm L 120 x H 125 x P 70

Peso complessivo: gr 50±

Composizione dei materiali

Maschera: 100% (TPE) Elastomero termoplastico anallergico

Copri filtro: 100% (PC) Policarbonato

Cinturini: Elastomero termoplastico

Filtri Stratificati Certificati: UNI EN 14683:2019 SMS Spunbond (PET) + Meltblown (PBT) + Spunbond (PET)

Taglia: Unica

QUANDO DROP MASK NON DEVE ESSERE UTILIZZATA

Drop Mask deve essere utilizzata esclusivamente dopo aver letto il presente manuale ed aver valutato che le caratteristiche indicate siano conformi al prodotto ricevuto. In caso contrario il prodotto non deve essere utilizzato.


- Non deve essere utilizzata dai soggetti che possano risultare allergici ai materiali di cui è composto il Prodotto.
- Evitare di indossare il Prodotto in caso di ferite o pelle abrasa nelle parti che saranno a contatto diretto con la maschera.
- Evitare l'uso improprio da parte dei bambini. L'uso del Prodotto sui minori deve essere sempre sorvegliato da un adulto.
- Non usare Drop Mask quando percepite una difficoltà respiratoria.

Il Produttore consiglia di sostituire i filtri ogni 6-8 ore, specie se la maschera viene utilizzata per periodi prolungati, in ambienti di lavoro e in ambienti in cui è rilevata eccessiva umidità e polvere. In questi casi è consigliabile sostituire i filtri con un intervallo di tempo inferiore.

MANUALE USO E MANUTENZIONE

CONTENUTO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

1. Maschera semirigida in gomma morbida anallergica;
2. Copri filtro in Policarbonato (PC) rigido;
3. Kit da 15 filtri stratificati SMS termosaldati mod Protection DF01;
4. n. 2 Cinturini in gomma con memoria elastica;
5. n. 1 Visiera paraschizzi (presente solo nei modelli Shield).

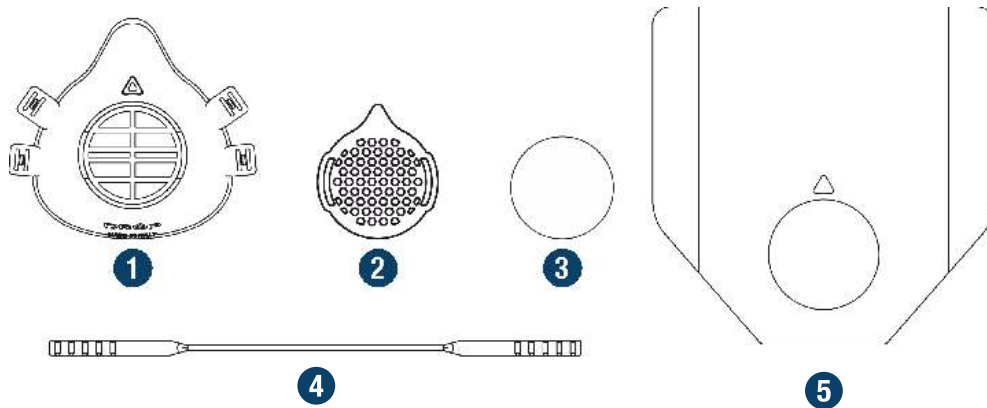

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DI DROP MASK




ATTENZIONE:
PRIMA DI APRIRE LA CONFEZIONE ASSICURATEVI DI AVER LAVATO LE MANI CON ABBONDANTE ACQUA TIEPIDA E DETERGENTE PER ALMENO 60 SECONDI.




ATTENZIONE:
LAVARE IN ACQUA CALDA E SAPONE NEUTRO I COMPONENTI PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO, AD ESCLUSIONE DEI FILTRI O CON SOLUZIONE IDROALCOLICA CON 70% DI ALCOL.


INDICAZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO

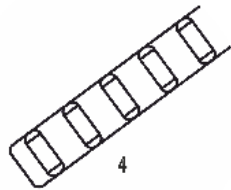


- 1** Dopo aver lavato tutti i componenti, predisporre i cinturini 4 per l'alloggiamento all'interno delle asole, posizionate ai lati della maschera.

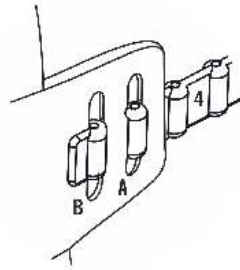


- 2** Inserire il cinturino nell'asola A degli appositi alloggi, posti alle estremità del corpo maschera. Inserire nell'asola B per completare il bloccaggio.

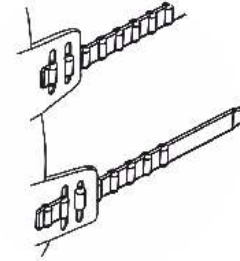

- 3** Ripetere l'operazione nelle asole sottostanti ed in entrambi i lati della maschera. La lunghezza corretta sarà determinata una volta applicata la maschera a volto.

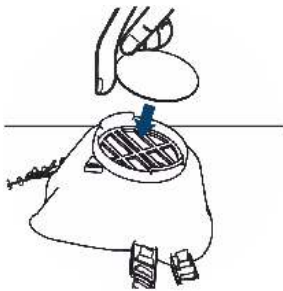


- 4** Posizionare la maschera su un piano d'appoggio orizzontale. Inserire un solo filtro (3) nell'alloggio della maschera. Toccare il filtro con mani pulite.

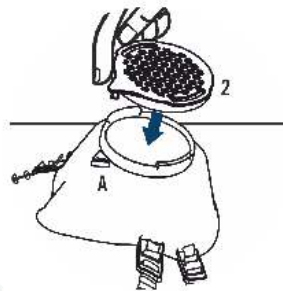


- 5** Inserire il copri filtro (2) innestando tutti i punti di aggancio. Esercitare una leggera pressione per accoppiare l'elemento con le asole laterali e l'innesto triangolare (A).



- 6** Posizionare la maschera per coprire naso e bocca sino al mento. Eventuali regolaggi dei cinturini vanno fatti a maschera tolta.

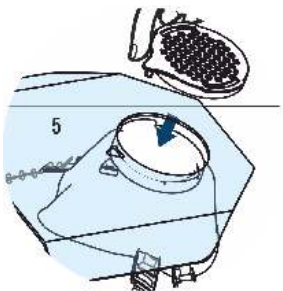

- 7** Sui modelli Shield: Sovrapporre la visiera (5) alla ghiera del corpo maschera, dopo aver provveduto ad inserire il filtro. Inserire il tappo copri filtro come da fig 4.

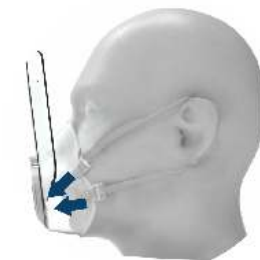

- 8** Posizionare la maschera per coprire naso e bocca sino al mento. Eventuali regolaggi dei cinturini vanno fatti a maschera tolta.



ATTENZIONE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lavare accuratamente il prodotto prima e dopo ogni utilizzo già dalla prima volta.

Non sostituire i filtri con materiali diversi da quelli indicati dal produttore, potreste pregiudicare la funzionalità del prodotto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MASCHERA DROP

Tutte le parti in gomma ed in policarbonato sono lavabili. Prima di un nuovo utilizzo rimuovere dalla sede il filtro già utilizzato e procedere alla pulizia lavando tutti i componenti con abbondante acqua calda e sapone neutro.

Per igienizzare il prodotto utilizzare una soluzione idroalcolica contenente alcol etilico al 70% o disinfettanti che non abbiano basi acide e comunque aggressive per i materiali di cui è composta Drop. Procedere alla pulizia di tutte le parti (ad esclusione del filtro). Inserire un nuovo filtro per tornare ad utilizzare la maschera.

Nota per i modelli Shield, dotati di visiera paraschizzi.

Per procedere con la pulizia rimuovere dalla sede il copri-filtro, successivamente la visiera, infine il filtro.

Per la pulizia della visiera utilizzare solo prodotti a base alcolica o neutri su un panno umido, per evitare di graffiare la superficie, compromettendone la trasparenza.

COME CONSERVARE DROP MASK

Smontare tutte le parti del prodotto lavarle o igienizzarle prima di riporle in un contenitore che possa preservarne le caratteristiche. Il Prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore o fiamme dirette. Evitare di tenere Drop Mask e Drop Shield in auto ed in modo particolare durante le giornate calde. Conservare i filtri non utilizzati all'interno di un contenitore a parte, dopo averlo opportunamente lavato e igienizzato. Evitare il contatto diretto con i filtri e, ove possibile la rimozione dalla confezione originale.

COME SMALTIRE I COMPONENTI

Drop Mask e Drop Shield sono prodotti costituiti da materiali riciclabili. Per lo smaltimento dei componenti occorrerà fare riferimento all'organizzazione locale, ovvero alle indicazioni fornite dai singoli Comuni sul conferimento dei componenti nei contenitori di raccolta differenziata. A norma di legge e nel rispetto dell'ambiente non è consentito abbandonare il Prodotto o disperderne i componenti nell'ambiente.

A tutela e salvaguardia della salute degli operatori ecologici, ogni componente di Drop dovrà essere inserito in un sacchetto di plastica a parte e chiuso, al momento dello smaltimento ed in particolar modo per i filtri.



Maschera facciale ad uso medico non sterile
Classe rischio del dispositivo medico: Classe 1/tipo IIR



Il prodotto ha una scadenza di 5 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione se utilizzato e conservato come indicato nelle istruzioni.



OTHER



RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il prodotto può contenere elementi che possono essere ingeriti accidentalmente.

Lavare accuratamente il prodotto prima e dopo ogni utilizzo già dalla prima volta.

Non sostituire i filtri con materiali diversi da quelli indicati dal produttore per non pregiudicare la funzionalità del prodotto.



SCOPRI DI PIÙ



Cappello Group S.p.A.
Zona Industriale IV fase, viale 3 n. 5 97100 Ragusa (RG) Italy

Aggiornato al 28 maggio 2020



Cappello Group S.p.A.

Zona Industriale IV fase, viale 3 n. 5 97100 Ragusa (RG) Italy T. +39 0932 660211 F. +39 0932 660222 info@dropmask.it

Le informazioni e le immagini contenute in questo documento sono di proprietà di Cappello Group S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale.

Le immagini e le illustrazioni riprodotte hanno valore dimostrativo. Colori e finiture possono non risultare conformi al prodotto originale.

Cappello Group S.p.A. si riserva di modificare informazioni e/o le caratteristiche tecniche secondo le esigenze necessarie a rendere il documento aggiornato.

Drop Mask e Drop Shield sono prodotti brevettati da Cappello Group S.p.A. Drop è un marchio depositato.



SCOPRI DI PIÙ